

La stimulation électrique fréquentée by Sedatelec

# AGISTIM DUO



ACUPUNCTURE  
ANTI-DOULEUR  
AURICULOTHÉRAPIE  
ESTHÉTIQUE MÉDICALE

**Sedatelec**





**Algies, troubles fonctionnels chroniques, addictions répondent particulièrement bien à cette électro-acupuncture.**

## Electro-acupuncture plus efficace, plus immédiate !

La stimulation électrique va renforcer l'action de vos aiguilles. Elle peut même se substituer à leur manipulation.

— **Tonification** : sélectionnez une fréquence basse (2 à 5Hz) et une stimulation prolongée.

— **Dispersion** : sélectionnez une fréquence haute (70-80Hz) et une courte durée.

L'indépendance électrique des canaux vous permet de réaliser, dans le même temps, des stimulations différentes sur plusieurs aiguilles, en choisissant facilement le mode d'émission.

*L'utilisation d'électrodes adhésives permettra de traiter, avec une efficacité identique, les enfants ou les patients craintifs.*

## Auriculothérapie

Traitez les points d'Auriculothérapie avec les **Fréquences Nogier**.

Le crayon Styl'Module vous garantit précision et confort de travail.

Utilisation en mode continu, discontinu ou balayage.

— Les 7 fréquences disponibles sont les **fréquences Nogier de référence**

**A** (2,28 Hz), **B** (4,56 Hz), **C** (9,12 Hz), **D** (18,25 Hz), **E** (36,5 Hz), **F** (73 Hz), **G** (1,14 Hz).

*La fréquence 1,14 Hz est également appelée Fréquence Universelle (U).*



**Troubles fonctionnels, problèmes musculo-squelettiques, douleurs, troubles psychiques, ... toutes les indications de l'Auriculothérapie.**

## Traitements anti-douleur scientifiquement confirmés

La stimulation électrique pulsée est aujourd'hui une technique éprouvée et validée par de nombreuses études scientifiques.

— **Mobilisation des fibres nerveuses** du type *gate control*, pour bloquer la douleur avant qu'elle n'atteigne les centres nerveux centraux. Utilisation *loco dolenti*, en contrôle segmentaire ou supra segmentaire, par une fréquence entre 10 et 80Hz;

— **Libération d'endorphines, opioïdes** qui contrôlent la sensation douloureuse, par une stimulation en basse fréquence, entre 1 et 10Hz.

*Sur aiguilles ou électrodes adhésives.*



**Troubles musculo-squelettiques,  
douleurs par nociception,  
névralgies, douleurs fantômes,  
analgésie acupunctureale,...**

## Esthétique & ElectroLipolyse une alternative douce pour des résultats visibles

La stimulation fréquentée de l'Agistim Duo assure d'excellents résultats dans la réduction des lipodystrophies localisées, en quelques séances hebdomadaires.

La stimulation des myofibrilles du derme permet de redonner du tonus à la peau, limitant les rides et affaissements.

L'utilisation du kit Lipolyse permet de brancher jusqu'à 16 aiguilles simultanément.

*Les aiguilles spécifiques ASE Sedatelec sont spécialement étudiées pour cette application (pointe diamant).*



**Ces résultats esthétiques  
sont renforcés par un  
traitement complémentaire  
par acupuncture, ciblé en  
particulier pour réduire l'appétit  
et améliorer la répartition de  
l'eau dans l'organisme**

## Efficacité par l'innovation OFSC\*

Un ingénieux programme de fluctuation permanente de la fréquence des impulsions autour de la fréquence sélectionnée permet de limiter fortement le risque d'accoutumance physiologique à la stimulation.

*\*Oscillation Fréquentielle Statistiquement Contrôlée : procédé exclusif breveté Sedatelec*

## Simplicité

- 2 stimulateurs autonomes dans le même appareil (fonction DUO)
- Boutons individuels pour régler le temps, la fréquence et l'intensité
- Ecran de contrôle multilangue (EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL)
- 4 canaux indépendants
- 2 à 16 connecteurs de couleur
- Stimulation sur **aiguilles** et par **électrodes** adhésives
- Timer jusqu'à 60 minutes

## Sécurité maximale

- Isolation totale vis-à-vis du courant secteur
- Sécurité qui empêche de débiter un traitement sans remise à zéro de l'intensité
- Mise en alerte si un paramètre de fréquence ou de mode d'émission est modifié au cours d'un traitement
- 4 canaux isolés électriquement



Les connecteurs d'aiguilles, par leur design original, assurent un contact parfait et constant avec l'aiguille, tout en garantissant une isolation totale de la peau.

**Vous pouvez confier à votre patient le soin de régler lui-même, si nécessaire, l'intensité de chaque canal au cours du traitement, puisqu'aucune fausse manœuvre n'est possible.**

## La signature Sedatelec : les Fréquences Nogier

Pré-programmées, les 7 fréquences Nogier (de A à G) peuvent être choisies individuellement ou en balayage, pour une stimulation en auriculothérapie et en acupuncture.



# AGISTIM DUO

L'excellence dans son domaine

Fonctions multiples, design, simplicité, sécurité et efficacité, sont les caractéristiques de l'AGISTIM DUO que vous et vos patients apprécierez chaque jour.

**Il affirme  
votre professionnalisme  
et la qualité  
de votre traitement.**



Demandez aujourd'hui la documentation « Plus d'information » sur l'AGISTIM DUO à votre distributeur ou en écrivant à [sedatelec@sedatelec.com](mailto:sedatelec@sedatelec.com)

*L'AGISTIM DUO n'est pas indiqué dans la rééducation fonctionnelle par myo-stimulation. Non homologué FDA (USA).*

Votre distributeur



**Sedatelec** • Chemin des Mûriers • F-69540 Igny • Lyon • France • Tél. +33 (0) 472 663 322  
Fax + 33 (0) 478 508 903 • [sedatelec@sedatelec.com](mailto:sedatelec@sedatelec.com) • [www.sedatelec.com](http://www.sedatelec.com)

FCP-AG-DUO-FR-2013-03 • n° d'autorisation graphiste 04 78 26 55 44 • document imprimé sur du papier recyclé et issu de bois gérés durablement.

