

premio 20 DT

elektronische punktsuche und stimulation



AURIKULOTHERAPIE

AKUPUNKTUR


REFLEXOLOGIE

Sedatelec[®]
YOUR WAY OF CARE,
OUR QUALITY DEVICES



40 Jahre Innovation im Dienste der Aurikulothérapie

Die von **Dr. Paul Nogier** in den 1950er Jahren entwickelte Aurikulothérapie ist von der WHO seit den 1990^{er} Jahren anerkannt. Heute wird diese Technik weltweit praktiziert.

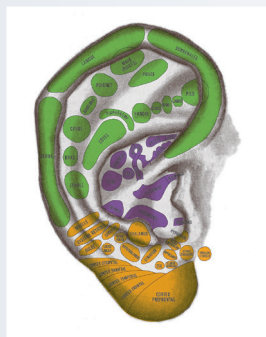

ASP® Original, die semi-permanenten Ohrakupunkturnadeln wurden in Frankreich von Sedatelec in Zusammenarbeit mit Dr. Nogier entwickelt und hergestellt.

Von der Entwicklung und Konzeption bis zur Fertigung bieten wir ein Produkt « **Made in France** ».


Sedatelec gewährt auf seine Produkte eine Garantie von 2 Jahren und eine Service-Laufzeit von bis zu 10 Jahren nach Ende ihrer Vermarktung.

ISO 13485
CE0123

CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

premio 20 DT

elektronische punktsuche und stimulation

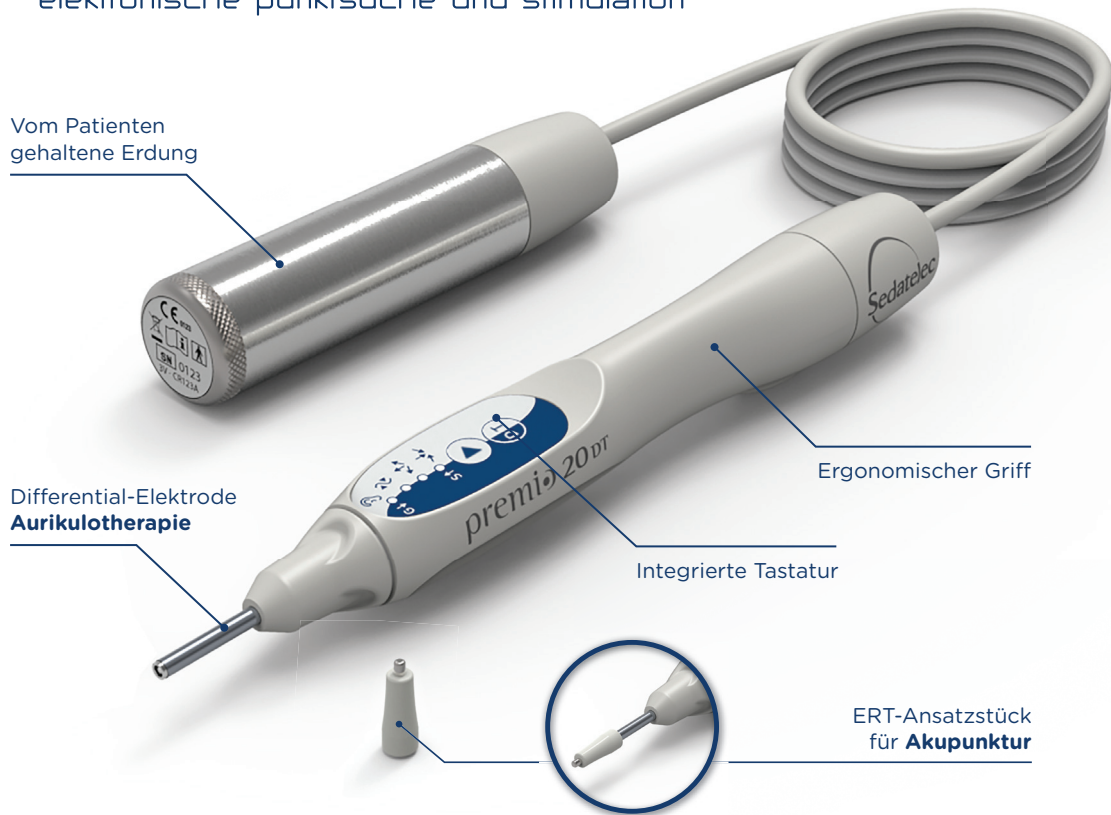

Sedatelec beteiligt sich seit den Anfängen an der Entwicklung der ersten Punktsucher für die Ohrakupunktur (Diascope®, Servoscope®, Agiscop®) und konzentriert mit dem **Premio 20** sein gesamtes Know-how und seine Erfahrung auf die Ausarbeitung einer neuen Gerätegeneration.

Bahnbrechend in seiner Konzeption

- PRAKTISCH:** Kein Kabel oder Zubehör erforderlich
- ERGONOMISCH:** Erstes Gerät mit Direktablesung am Ohr
- PRÄZISE:** Differential-Punktsucher mit 9 Stufen und LED-Anzeige
- INNOVATIV:** Wobbelfrequenz von 1 bis 100 Hz bei Stimulation
- EINFACH:** Einstellbare Auslöseschwelle des Signaltons
- BEQUEM:** Automatische Kalibrierung der Stimulationsintensität




Die Punktsuche

- Ein Messstrom, der gering genug ist, um eine Störung des Punktes zu vermeiden.
- Elektroden-Hautkontakt mit konstantem Druck.
- **Hochpräziser** Differential-Punktsucher (Punkt und benachbarte Bereiche).
- Punktsuche mit niedriger (Gold) oder hoher (Silber) Impedanz.
- **Einstelbare Auslöseschwelle des Signaltons.**
- Kontinuierliche Messanzeige in **9 Stufen**.
- Die Vom Patienten gehaltene Erdung, isoliert den Therapeuten vom Messkreis.

Die Differential-Punktsuche

Messung der Umgebung

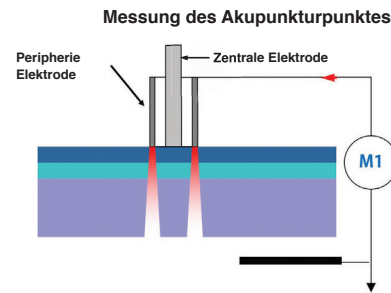

3 LED-Leuchtanzeigen



Automatische Kalibrierung der Signalton-Auslöseschwelle durch Messung des Nullpunktes.

VERSION D

VERSION DT





Die Stimulation

- Mit einfachem Druck auf die «D/T»-Taste stimuliert der Therapeut mit einem Ablauf der 7 Nogier-Frequenzen (einschließlich 1,14 Hz), **ohne den lokalisierten Punkt aus den Augen zu verlieren.**
- **Automatische Kalibrierung** der Stimulationsintensität: keine Schmerzen und kein brennendes Gefühl für den Patienten.
- Ein leiser und rasch hintereinander folgender Signalton zeigt dem Patienten und dem Therapeuten an, dass die Stimulation im Gange ist.
- Ein stärkerer Signalton alle 30 Sekunden taktet die Zeit: Die durchschnittliche Stimulationsdauer um den Punkt zu neutralisieren.
- Ein erneuter Druck auf die «D/T» Taste ermöglicht es, die Punktsuche wiederaufzunehmen, ohne das untersuchte Ohr aus den Augen zu lassen.



aurikulothérapie



Die Punktsuche

- **Direktmessung** des Impedanzabfalls.
- **ERT-Ansatzstück** Spezial "Körper", mit sanfter Spitze für perfektes Gleiten.
- Progressives Aufleuchten der Dioden proportional zur Messung.
- Direkt- und Sofortablesung der Messung auf dem Gerät, mit Bestätigung durch Signalton.
- **Speicherung des gefundenen Punktes** mit der niedrigsten Impedanz.
- **Zuverlässigkeit:**
Die vom Patienten gehaltene Erdung isoliert den Therapeuten vom Messkreis.



Die Stimulation

– Ohne dass der Therapeut den lokalisierten Punkt aus den Augen verliert, beginnt mit einem einfachen Druck der “D/T”- Taste, eine auf dem Bedarf des Patienten angepasste Stimulation.

– **INNOVATION:**

Wobbelfrequenz-Emission:

- wechselnd für die **Harmonisierung**,
- senkend, von 100 bis 1 Hz für die **Sedierung**,
- steigend, von 1 bis 100 Hz für die **Tonisierung**.


– Die Anwendung des Durchlaufes der Nogier-Frequenzen ist möglich.

– Automatische Anpassung der Stimulationsintensität: keine Schmerzen und kein brennendes Gefühl für den Patienten.

– Ein regelmäßig ertönder Signalton zeigt dem Patienten und dem Therapeuten an, dass die Stimulation im Gange ist.


– Ein stärkerer Signalton alle 30 Sekunden taktet die Zeit.

– Ein erneuter Druck auf die «D/T»-Taste ermöglicht die Wiederaufnahme der Punktsuche, ohne den untersuchten Bereich aus den Augen zu lassen.

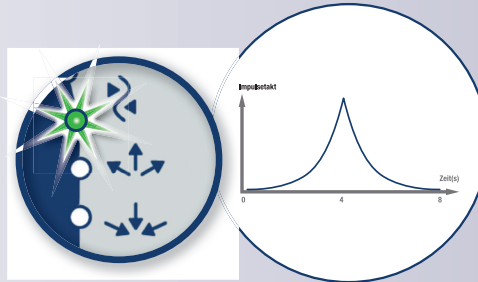


HARMONISIERUNG

Diese Stimulation gleicht den Punkt und die Zirkulation im Meridian durch einen Rhythmuswechsel von schnellen und langsamen Impulsen aus.

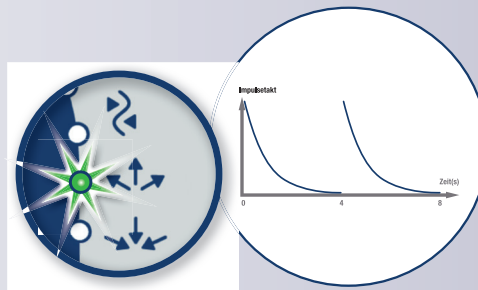

SEDIERUNG (100 bis 1 Hz)

In wenigen Sekunden führen Sie die Sedierung von Qi durch und beseitigen den Energie-Stau. Die Sedierung wird durch eine Verlangsamung des Rhythmus der ausgesendeten Impulse erzielt.

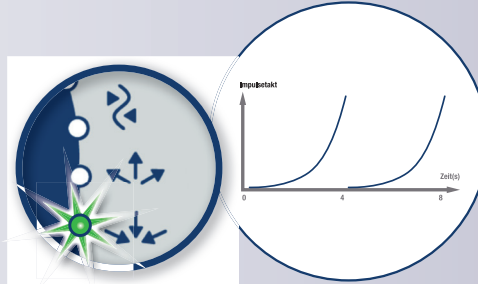

TONISIERUNG (1 bis 100 Hz)

Kontrollierte und rasche Stimulation der Akupunkturpunkte. Dynamisierender Effekt durch einen beschleunigten Rhythmus der ausgesendeten Impulse.

Ein Signalton alle 30 Sekunden

Effizient, leicht und ergonomisch

Der ideale **Punktsucher
und Stimulator**
für die Praxis
und unterwegs.



Händlerstempel

CE 0123

Hergestellt in Frankreich



Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny (Lyon) • Frankreich
Tel : +33 (0) 472 663 322 / Fax : +33 (0) 478 508 903
contact@sedatelec.com • www.sedatelec.com

Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen sorgfältig durch.



SED-PREMIO20-DE-2020-04 • novartis.creation@wanadoo.fr - 04 78 28 55 44 • photos : istock • © Sedatelec