


premio 20DT

detección y estimulación eléctrica

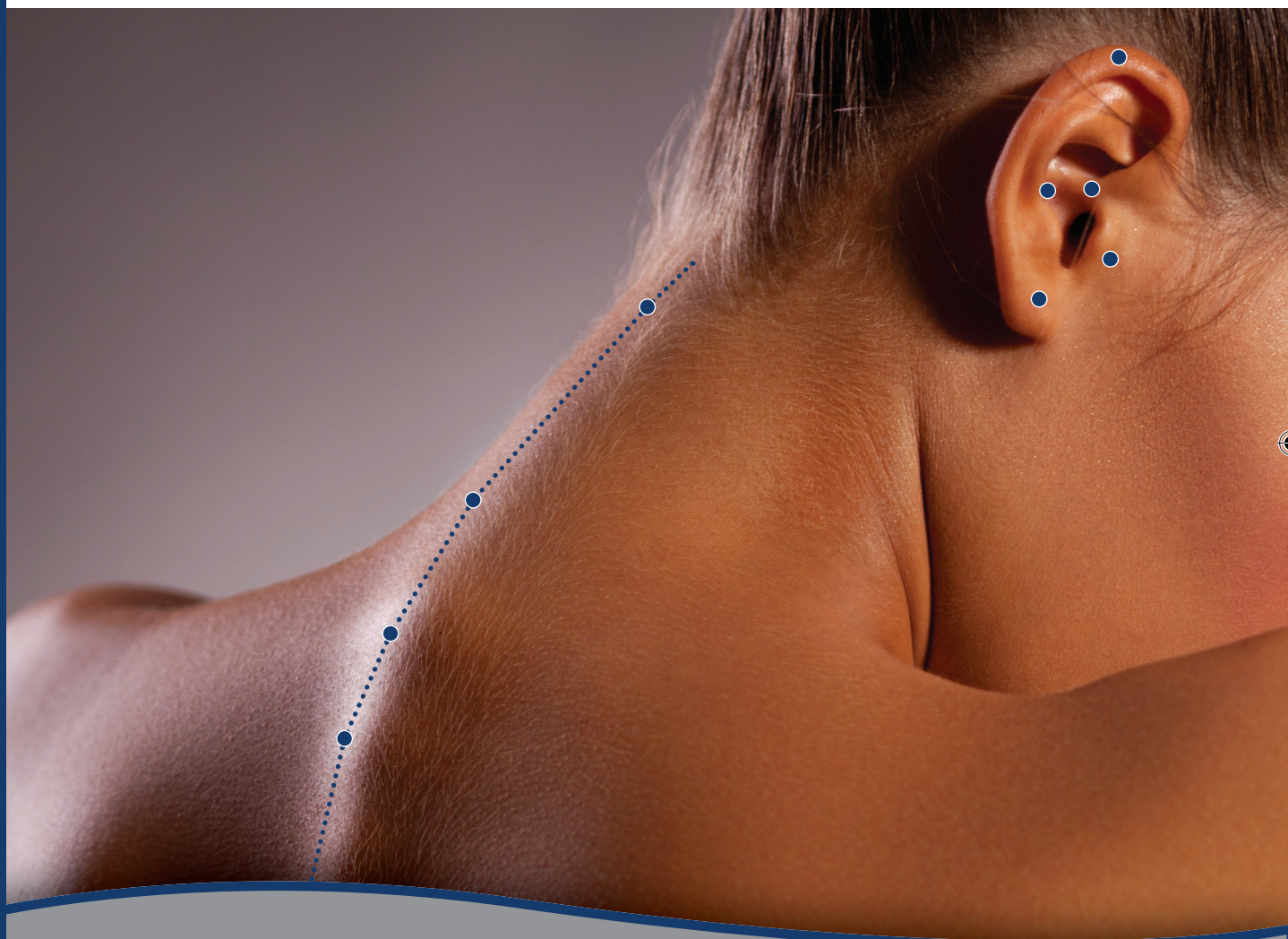

AURICULOTERAPIA

ACUPUNTURA


REFLEXOLOGÍA





40 años de innovación y servicios dedicados a la auriculoterapia

Creada por el **Dr. Paul Nogier** en los años 50, la auriculoterapia fue reconocida por la OMS en la década de los 90. Actualmente, esta técnica se practica en todo el mundo.

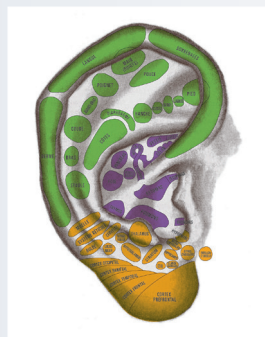

La ASP® Original o aguja semi-permanente fue concebida y fabricada en Francia por Sedatelec en colaboración con el Dr. Nogier.

Desde la fase de I+D hasta la fabricación, pasando por su diseño y desarrollo, todo el producto es « **Made in France** ».


Sedatelec garantiza sus productos durante 2 años y ofrece servicio post-venta en sus instalaciones ubicadas en Lyon durante un periodo de hasta 10 años tras la suspensión de su comercialización.

ISO 13485
CE0123



premio 20 DT

detección y estimulación eléctrica

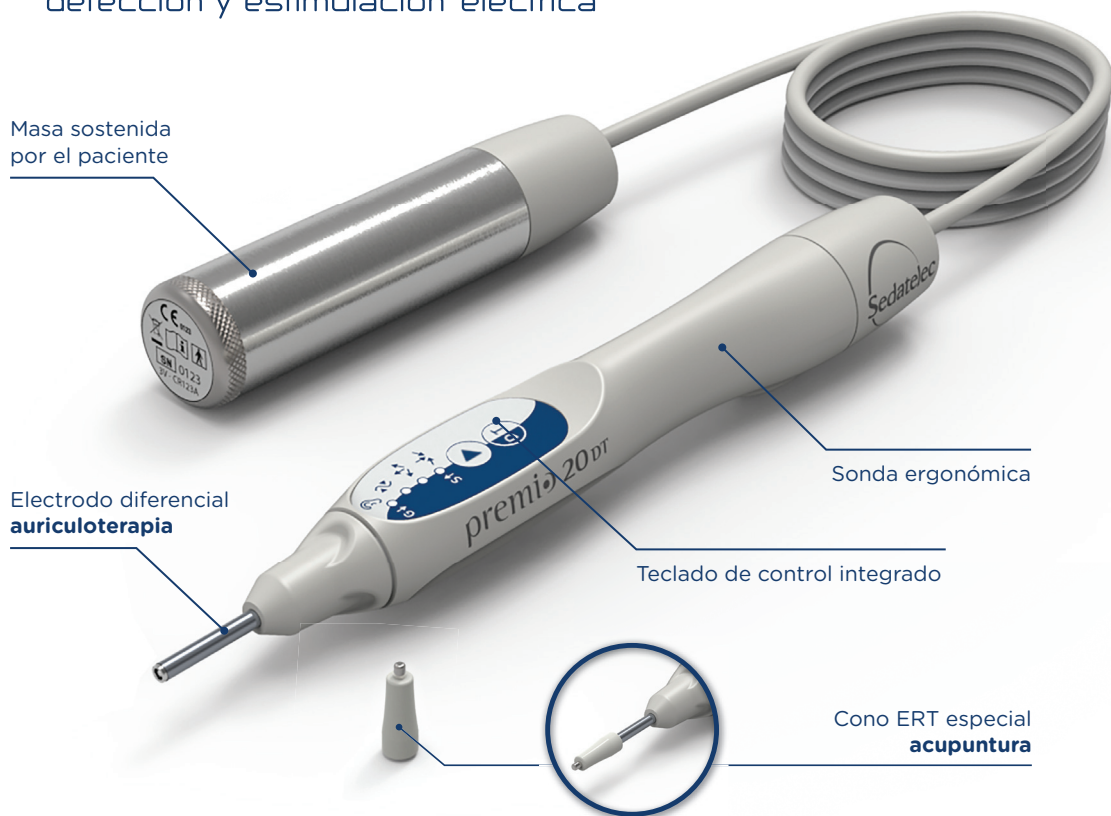

Presente desde el origen de los primeros detectores de puntos del pabellón auricular (Diascope®, Servoscope®, Agiscop®), **Sedatelec** ha concentrado todos sus conocimientos y experiencia en la elaboración de una nueva generación de dispositivos con el **Premio 20**.

Un diseño revolucionario

PRÁCTICO: sin necesidad de instalar ningún cable o accesorio

ERGONÓMICO: primer aparato de lectura directa en la oreja

PRECISO: detección diferencial de 9 niveles con visualización mediante LED

INNOVADOR: modulación de frecuencias entre 1 y 100 Hz en estimulación

SENCILLO: ajuste del umbral de activación acústica

CÓMODO: adaptación automática de la intensidad de estimulación




La detección

- Una corriente de medición lo suficientemente baja para no perturbar el punto.
- Una presión constante de los electrodos de medición sobre la epidermis.
- Sistema de detección diferencial (punto y entorno) de **alta precisión**.
- Detección posible con una impedancia baja (Gold) o alta (Silver).
- **Umbral de activación acústica ajustable**.
- Visualización continua de la medición en **9 niveles**.
- Un electrodo de masa sostenido por el paciente, lo que permite aislar al terapeuta del circuito de medición.

La detección diferencial

Medición del entorno del punto

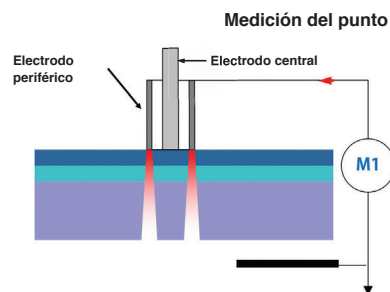

3 niveles de indicación luminosa mediante LED



Ajuste automático del umbral de activación acústica mediante la medición del punto «0».

VERSIÓN D

VERSIÓN DT





La estimulación

- **Sin retirar la vista** del punto detectado, simplemente con pulsar la tecla «D/T» se inicia una estimulación mediante el barrido de las 7 frecuencias de Nogier (incluida 1,14 Hz).
- **Adaptación automática** de la intensidad de la estimulación: sin dolor ni sensación de escozor.
- Emisión de un «BIP» rápido y de volumen bajo que indica al paciente y al terapeuta que la estimulación se está llevando a cabo.
- Duración marcada por un «BIP» de mayor intensidad cada 30 segundos: duración media necesaria para invalidar el punto.
- Solo hace falta pulsar otra vez la tecla «D/T» para reiniciar la detección sin retirar la vista de la oreja explorada.



auriculoterapia




La detección

- **Medición directa** del descenso de impedancia.
- **Cono ERT** especial «Cuerpo» con punta suave para un deslizamiento perfecto.
- Iluminación progresiva de los diodos proporcional a la medición.
- Lectura directa e instantánea de la medición obtenida con la sonda, confirmada con un «BIP acústico».
- **Memorización del punto cutáneo** detectado con la impedancia más baja.
- **Fiabilidad:** electrodo de masa sostenido por el paciente, lo que permite aislar al terapeuta del circuito de medición.




La estimulación

- Sin retirar la vista del punto detectado, simplemente con pulsar la tecla «D/T» se inicia una estimulación adaptada a las necesidades del paciente.
- **INNOVACIÓN:** emisión por vobulación de frecuencias:
 - alternada para la **armonización**,
 - descendente entre 100 y 1 Hz en **dispersión**,
 - ascendente entre 1 y 100 Hz en **tonificación**.
- Posibilidad de trabajar mediante el barrido de las frecuencias de Nogier.
- Adaptación automática de la intensidad de la estimulación: sin dolor ni sensación de escozor.
- Emisión de un «BIP» regular que indica al paciente y al terapeuta que la estimulación se está llevando a cabo.
- Duración marcada por un «BIP» de mayor intensidad cada 30 segundos.
- Solo hace falta pulsar otra vez la tecla «D/T» para reiniciar la detección sin retirar la vista de la zona explorada.

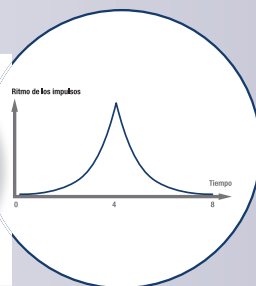


ARMONIZACIÓN

Esta estimulación reequilibra el punto y la circulación en el meridiano, mediante la alternancia de aceleraciones y ralentizaciones del ritmo de impulsión.

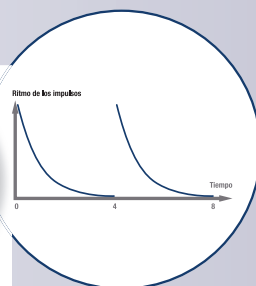

DISPERSIÓN (100 a 1 Hz)

En cuestión de segundos, se consigue la dispersión del Qi y se elimina el estancamiento de energía. La dispersión se logra mediante la ralentización del ritmo de emisión de los impulsos.

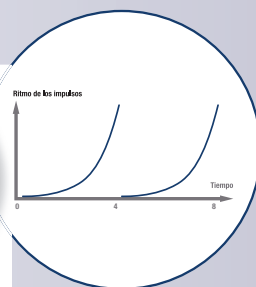

TONIFICACIÓN (1 a 100 Hz)

Estimulación de los puntos de acupuntura controlada y rápida. Efecto dinamizador mediante la aceleración del ritmo de emisión de los impulsos.

Un «BIP» cada 30 segundos

Eficaz, ligero y ergonómico

Un **detector/estimulador** ideal tanto en la consulta como en desplazamientos.



sello del distribuidor

CE 0123

Fabricado en Francia



Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny (Lyon) • Francia
Tel: +33 (0) 472 663 322 / Fax: +33 (0) 478 508 903
contact@sedatelec.com • www.sedatelec.com

