

premio 30 evo

Laser duo

¡NOVEDAD!

Dinamice
el Qi en
profundidad



ACUPUNTURA

AURICULOTERAPIA

ADICCIONES

REFLEXOTERAPIA

Sedatelec[®]
YOUR WAY OF CARE,
OUR QUALITY DEVICES

premio 30 eva

Laser duo



4 programas de estimulación

2 potencias adaptadas:
 - puntos superficiales (15 W)
 - puntos profundos (100 W)

Batería recargable

Dispositivo médico de clase IIa

Láser frío para una estimulación infrarroja indolora de los puntos de acupuntura, de los puntos auriculares y de los puntos gatillo

La Bioestimulación al servicio del Qi



Entre la tradición y modernidad: seguro y eficaz

- INALÁMBRICO:** uso cómodo, sin restricciones
- ECONÓMICO:** sin consumibles
- ERGONÓMICO:** acceso directo a los 4 programas mediante un botón específico
- ADAPTABLE:** 2 potencias adaptadas para:
 - Puntos superficiales - 15 W: rostro, orejas, niños...
 - Puntos profundos - 100 W: otros puntos del cuerpo
- DINÁMICO:** movilización del Qi
- RÁPIDO:** 30 s / punto



Estimulación en acupuntura

- Armonización**
Este modo reequilibra el punto y la circulación en el meridiano alternando los ritmos de impulso.
- Dispersión**
En cuestión de segundos, dispersión del Qi y evacuación del estancamiento de energía.
- Tonificación**
Estimulación controlada y rápida de los puntos de acupuntura

Estimulación en auriculoterapia

Barrido de frecuencias de Nogier

Emisión sucesiva de todas las frecuencias de Nogier (de la A a la G), lo que permite enviar un mensaje adaptado para cualquier sintomatología.

Esta exploración permite estimular los llamados puntos patológicos en auriculoterapia, la cual es conocida por su eficacia en casos de dolor, trastornos psicológicos o funcionales, adicciones, etc.

- Dinámica adaptada de la emisión de los impulsos:**
- Vobulación de frecuencias para dinamizar el Qi
 - Frecuencias de Nogier en auriculoterapia

La dinámica del Qi



El Qi expresa esta noción de aliento vital, de energía, de fuerza en acción; representa la vida, simboliza el movimiento. Esta energía fluye constantemente a través de los meridianos, expresa el Yin y el Yang en su equilibrio y en el ciclo regular de su alternancia. Permite el funcionamiento armonioso del ser vivo, tanto en su individualidad como integrado en su entorno inmediato y en la globalidad del universo.


Durante el examen clínico minucioso y global, una vez localizada la disfunción y analizadas sus causas, será necesario **tonificar** donde falte energía, **dispersarla** donde exista en exceso y **armonizar** y reorientar el flujo cuando los puntos de intersección estén alterados.



Armonización

alternancia de tonificación y dispersión


Alternancia de aceleraciones y ralentizaciones del ritmo de emisión.

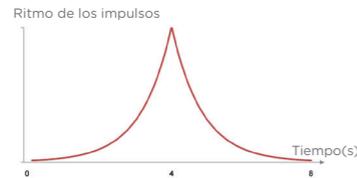

Dispersión

(10.000 a 100 Hz)

Se logra al ralentizar el ritmo de emisión de los impulsos.

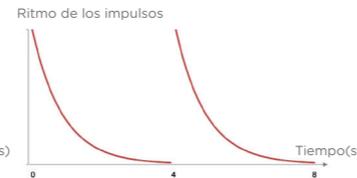

Tonificación

(100 a 10.000 Hz)

Aceleración del ritmo de emisión de los impulsos que posee un efecto dinamizador.



La vobulación para conservar el Qi:


Sedatelec ha desarrollado un sistema particular de los impulsos fisiológicos basada no tanto en las frecuencias, que son repetitivas por naturaleza, sino sobre la dinámica, la aceleración o la deceleración, considerándose la variación de la señal como base de la información descodificada por el organismo.

¡Lo que cuenta para un organismo vivo es la dinámica, el cambio, la variación!

Estimulación eficaz


Longitud de onda

La emisión de infrarrojos con una longitud de onda de 905 nm atraviesa la barrera cutánea para llegar a lo más profundo de las células y penetra de forma segura siendo menos absorbida por el agua, la hemoglobina y la melanina.

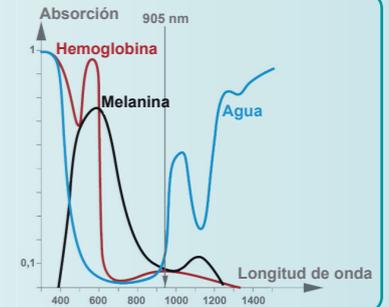

Potencia cresta


Se puede seleccionar una potencia de **15 o 100 vatios** según la profundidad deseada. La potencia cresta de **100 vatios** proporciona al rayo láser **la potencia necesaria para penetrar en las células profundas** y aportar información útil al punto.

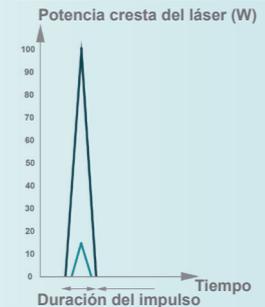

Emisión pulsada

Emisión por impulsos muy cortos (<100 ns) repetidos con un tiempo de reposo importante. Aportan una energía entre:

- **150 mJ/30 s** para 15 vatios
- **1,25 J/30 s** para 100 vatios, sin efecto térmico destructor.

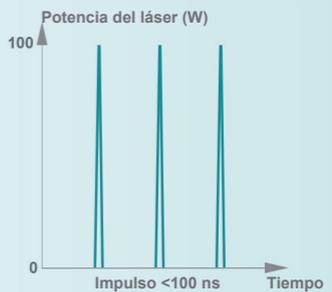



Fundada en 1978, Sedatelec colabora con el doctor Paul NOGIER (1908-1996), padre de la auriculoterapia, y desarrolla los primeros aparatos emisores de frecuencias de láser para diagnóstico.

Desde la fase de I+D hasta la comercialización, pasando por la fabricación, todo los productos son «Made in France».

Sedatelec garantiza sus productos durante 2 años y su servicio posventa se realiza en sus locales de Lyon hasta 10 años después del fin de la comercialización.



Efectos del Soft Laser constatados por todos

– REFLEXÓLOGO D.F. Lyon

El Premio 30 EVO es mi aliado en la práctica de la reflexología auricular y facial. Es una buena herramienta de estimulación indolora y práctica. Lo utilizo para las tendinitis y ciáticas estimulando los puntos auriculares correspondientes y sus efectos se aprecian de inmediato. ¡No puedo vivir sin él!

– ACUPUNTOR E.S. Aix-en-Provence

He probado el Premio 30 EVO y estoy impresionado con los resultados obtenidos en mis pacientes.

Lo utilizo para estimular los puntos de acupuntura con los modos «superficial» y «profundo», su eficacia es verdaderamente comparable a la sensación de una aguja. ¡Lo recomiendo sin ninguna duda!

– ACUPUNTOR Nancy

Mis colegas y yo hemos probado el PREMIO 30 EVO y lo hemos comparado con el PREMIO 30 de la generación anterior.

Personalmente, me ha encantado y mis colegas también han mostrado un gran aprecio. Lo utilizamos a diario.

– TERAPEUTA MTC S.C. St Genis Laval

Llevo un año utilizando el PREMIO 30 y estoy muy satisfecho.

Es una superherramienta especialmente adaptada para las personas delicadas (niños, ancianos, etc.) y para las personas que tienen fobia a las agujas. Lo recomiendo.

Un láser sin cable, ideal tanto para el consultorio como para las visitas a domicilio

El maletín incluye:

- El PREMIO 30 EVO
- 1 verificador del control de emisiones
- 1 par de gafas protectoras
- 1 cargador
- 1 manual de uso



Antes de cualquier uso, lea atentamente las instrucciones de uso



Dispositivo láser de clase 3B conforme a IEC 60825-1

Radiación láser invisible

La exposición al rayo es peligrosa para los ojos. Advertencia: la legislación federal restringe la adquisición de este dispositivo a un profesional de la medicina o por orden de este.

sello del distribuidor

CE 0123

Fabricado en Francia