

# premio 30 evo

Laser duo

NOUVEAU !

Dynamisez  
le Qi en  
profondeur



ACUPUNCTURE

AURICULOTHÉRAPIE


ADDICTIONS

RÉFLEXOTHÉRAPIE

**Sedatelec**<sup>®</sup>  
YOUR WAY OF CARE,  
OUR QUALITY DEVICES

# premio 30 evo

Laser duo

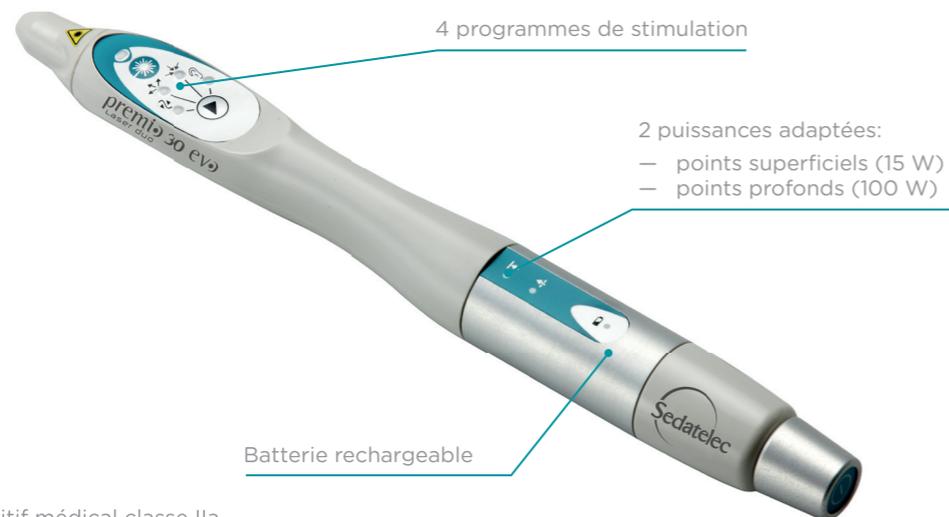

Dispositif médical classe IIa

## Un laser froid pour une stimulation infrarouge indolore des points d'Acupuncture, des points Auriculaires et des Trigger points

La biostimulation au service du Qi

### Entre tradition et modernité : sûr et efficace

**SANS FIL** : pratique aisée, sans contrainte

**ÉCONOMIQUE** : pas de consommable

**ERGONOMIQUE** : accès direct aux 4 programmes par touche dédiée

**ADAPTÉ** : 2 puissances adaptées :

- Points superficiels 15 W : visage, oreilles, enfants...

- Points profonds 100 W : autres points du corps

**DYNAMIQUE** : mobilisation du Qi

**RAPIDE** : 30 sec / point



## La stimulation en Acupuncture

### Harmonisation

Ce mode rééquilibre le point et la circulation dans le méridien par l'alternance des rythmes d'impulsion.

### Dispersion

En quelques secondes, dispersion du Qi et évacuation de la stase d'énergie.

### Tonification

Stimulation des points d'acupuncture contrôlée et rapide.

## La stimulation en Auriculothérapie

### Balayage des fréquences de Nogier

Emission successive de toutes les fréquences de Nogier (de A à G) permettant de délivrer un message adapté quelle que soit la symptomatologie.

Ce balayage vous permet une stimulation des points dits pathologiques en auriculothérapie dont l'efficacité est reconnue en cas de douleurs, troubles psychologiques ou fonctionnels, addictions, ...

### Une dynamique adaptée de l'émission des impulsions :

- La vobulation de fréquences pour dynamiser le Qi
- Les fréquences de Nogier en auriculothérapie

# La dynamique du Qi




Le Qi exprime cette notion de souffle vital, d'énergie, de force en action, il représente la vie, il symbolise le mouvement. Cette énergie circule en continu dans les méridiens, exprime le Yin et le Yang, dans leur équilibre et dans le cycle régulier de leur alternance. Elle permet le fonctionnement harmonieux de l'être vivant, dans son individualité, intégré dans son environnement immédiat comme dans la globalité de l'univers.

Lors de l'examen clinique approfondi et global, après le repérage de dysfonctionnements et l'analyse des causes, il faut **tonifier** là où l'énergie manque, **disperser** là où elle est en excès, **harmoniser**, réorienter le flux, lorsque les points de croisement sont perturbés.


## Harmonisation alternance de tonifications et dispersions

Alternance d'accélération et de ralentissements du rythme d'émission.

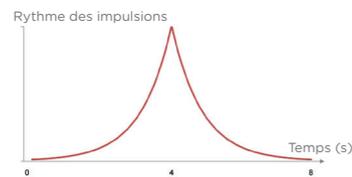


## Dispersion (10 000 à 100 Hz)

Obtenue par un ralentissement du rythme d'émission des impulsions.

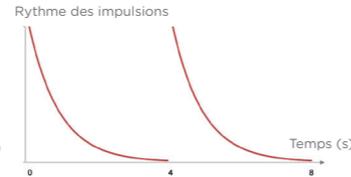

## Tonification (100 à 10 000 Hz)

Accélération du rythme d'émission des impulsions qui a un effet dynamisant.

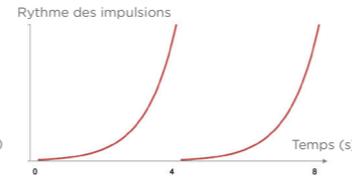

## La Vobulation pour préserver le Qi :


Sedatelec a mis au point une gestion particulière des impulsions physiologiques, basée non plus sur les fréquences, répétitives par nature, mais sur la dynamique, l'accélération ou la décélération, la variation du signal étant considérée comme base de l'information décodée par l'organisme.

**Ce qui compte pour un organisme vivant, c'est la dynamique, le changement, la variation !**

# Une stimulation efficace

## La longueur d'onde


L'émission **infrarouge, à une longueur d'onde de 905 nm**, traverse la barrière cutanée pour atteindre les cellules en profondeur et pénètre en toute sécurité, en étant moins absorbée par l'eau, l'hémoglobine et la mélanine.

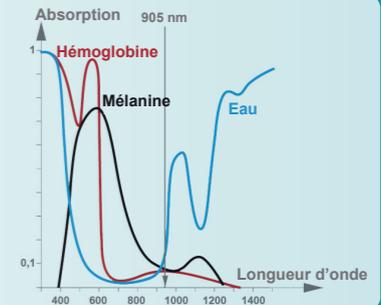

## La puissance crête

La puissance **15 ou 100 Watts** est sélectionnable en fonction de la profondeur souhaitée.

Une puissance crête de **100 Watts** donne au rayon laser **la puissance nécessaire pour pénétrer jusqu'aux cellules profondes** et apporter l'information utile au point.

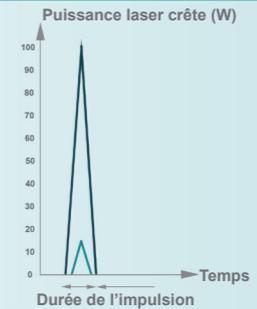



## Une émission pulsée

Emission par des impulsions très courtes (<100ns) répétées avec un temps de repos important.

Elles apportent une énergie entre:

- **150 mJ/30 sec** pour 15 Watts
- **1.25 J/30 sec** pour 100 Watts, sans effet thermique destructeur.

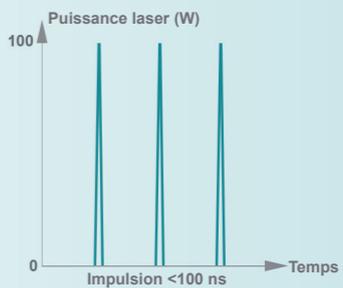

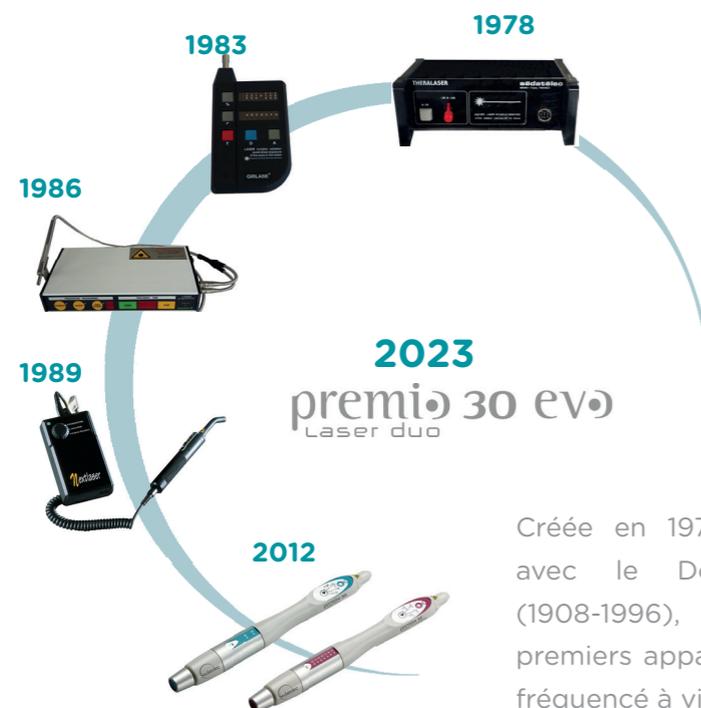

Créée en 1978, Sedatelec collabore avec le Docteur Paul NOGIER (1908-1996), et met au point les premiers appareils émetteurs de laser fréquencé à visée diagnostique.

Depuis la R&D jusqu'à la commercialisation, en passant par la fabrication, tout est « Made in France ».

Sedatelec garantit ses produits pendant 2 ans et son SAV est assuré dans ses locaux, à Lyon, jusqu'à 10 ans après l'arrêt de leur commercialisation.

CONÇU & FABRIQUÉ  
EN FRANCE



## Les effets du Soft Laser constatés par tous

### – RÉFLEXOLOGIE D.F. Lyon

Le Premio 30 EVO est mon allié dans ma pratique en réflexologie auriculaire et faciale. C'est un bon outil de stimulation indolore et maniable. Je l'utilise pour les tendinites et sciatiques en stimulant les points auriculaires correspondants et l'effet ressenti est immédiat. Je ne peux plus m'en passer !

### – ACUPUNCTURE E.S. Aix-en-Provence

J'ai testé le Premio 30 EVO et je suis impressionné par les résultats obtenus chez mes patients !

Je l'utilise pour stimuler les points d'acupuncture avec les modes « superficiel » et « profond », l'efficacité est vraiment comparable au ressenti d'une aiguille. Je le recommande vivement !

### – ACUPUNCTURE Nancy

Mes collègues et moi avons testé le PREMIO 30 EVO vs le PREMIO 30 ancienne génération.

Personnellement je suis très enthousiaste et mes collègues ont beaucoup apprécié également. Nous l'utilisons au quotidien.

### – PRATICIEN MTC S.C. St Genis Laval

J'utilise le PREMIO 30 depuis un an et j'en suis pleinement satisfait.

C'est un super outil particulièrement adapté aux personnes fragiles (enfants, seniors ...) et aux personnes phobiques des aiguilles.

Je le recommande.

Un Laser sans fil, idéal au cabinet  
et en déplacement

**Mallette comprenant :**

- Le PREMIO 30 EVO
- 1 testeur de contrôle d'émission
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 chargeur
- 1 mode d'emploi



*Avant toute utilisation, lire attentivement  
le mode d'emploi*



*Appareil à laser de classe 3B selon IEC 60825-1  
Rayonnement laser invisible*

*Exposition au faisceau dangereuse pour les yeux.*

*Caution : Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.*

cachet distributeur

**CE** 0123  
Made in France

FCP-SED-PREMIO30EVO-FR-2023-06 / © Sedatelec



Chemin des Mûriers • 69540 Irigny (Lyon) • France  
Tel : +33 (0) 472 663 322 / Fax : +33 (0) 478 508 903  
contact@sedatelec.com • [www.sedatelec.com](http://www.sedatelec.com)